

# schülke -†



Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni (w tym - powierzchni wyrobów medycznych)

## mikrozyd<sup>®</sup> AF liquid płyn

### Zalety

- opakowanie zaopatrzone w nakrętkę z otworem zabezpieczonym kapslem
- możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu
- nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych
- skuteczność w bardzo krótkim czasie
- dobra tolerancja materiałowa
- posiada przyjemny zapach
- preparat szybko schnący, nie pozostawia zacieków
- wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Obszary zastosowania

- do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi
- do dezynfekcji: zestawów zabiegowych, leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych
- do dezynfekcji sprzętu stomatologicznego, w tym końcówek stomatologicznych
- możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych
- do szybkiego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, sprzętów i urządzeń w placówkach publicznych (w tym przedszkola i żłobki), higienie komunalnej oraz placówkach opieki zdrowotnej.

### Właściwości produktu

Gotowy do użycia preparat na bazie mieszaniny alkoholi do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów i wyposażenia medycznego.

Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia) oraz wykazuje ograniczone działanie wirusobójcze (adeno, noro, rota, polyoma SV40).

### Wskazówki dotyczące stosowania

mikrozyd<sup>®</sup> AF liquid dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Preparat należy nanieść w postaci nierozcieńczonej na powierzchnię wyrobów i urządzeń medycznych, aż do ich całkowitego zwilżenia. Po wymaganym czasie kontaktu powierzchnia wysycha. W razie potrzeby nadmiar preparatu usunąć za pomocą suchej (nie barwionej) chusteczki jednorazowego użytku.

CE 0297



# mikrozid<sup>®</sup> AF liquid

płyn

## Dane produktu

100 g preparatu mikrozid<sup>®</sup> AF liquid zawiera: 25 g etanolu (94%), 35 g propan-1-ol.

Oznakowanie opakowania zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004: kompozycje zapachowe

### Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	Nie dotyczy
Tarcie, dynamiczne	nie określono
Temperatura zapłonu	27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

## Wskazówki szczególne

Tworzywa sztuczne szczególnie nieodporne na działanie alkoholi, jak np. poliakryl (szkło akrylowe) nie powinny być dezynfekowane za pomocą preparatu mikrozid<sup>®</sup> AF liquid. nie nadaje się do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. Nie spożywać preparatu. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła, iskrzenia i innych źródeł zapłonu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Preparat stosować w ilości najwyżej 50 ml/m<sup>2</sup>. Nie używać po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 5 lat

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
MIKROZID AF LIQUID płyn 1L FL	10/Karton	109302
MIKROZID AF LIQUID płyn PL/HU 250ml FL	10/Karton	109309
MIKROZID AF LIQUID płyn 10L FL	1/Kanister	109154

## Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

## Badania i informacje

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4874/12  
Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Produkt do użytku profesjonalnego.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

**Dystrybutor**  
Schulke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 22 11 60 700  
Telefax +48 22 11 60 701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schuelke.com

**Wytwórca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com